

**LENTE DE CONTATO:
TIRE AS SUAS DÚVIDAS!**



artwork
DENTAL LAB

The image features two dental crowns, one larger and more rounded on the left, and one smaller and more pointed on the right. They are set against a light blue gradient background and are reflected on a white surface below. A blue, rounded rectangular text box is positioned over the smaller crown. The text inside the box is white and discusses the growing use of contact lenses in dentistry, their transformative power with minimal invasion, and the need for clarification from dentists to avoid errors.

As lentes de contato têm ganhado progressivamente mais espaço na odontologia, graças ao seu grande poder transformador com mínima invasão. Essas peças, entretanto, ainda trazem algumas dúvidas ao cirurgião-dentista. Esclareça alguns pontos importantes deste tratamento e evite erros!

QUAIS AS PRINCIPAIS CONTRAINDICAÇÕES DAS LENTES DE CONTATO?

Antes de pensar em indicar lentes de contato, dois fatores merecem atenção especial: a cor e a posição dos dentes. Dentes com alto grau de escurecimento devem ser previamente clareados, quando possível; caso contrário, o tratamento é contraindicado, pois as lentes de contato apresentam alto grau de transparência. Dentes com grande alteração de posição, principalmente muito lingualizados, também não são indicados às lentes.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE AS FACETAS E AS LENTES DE CONTATO?

Basicamente, a espessura. As facetas laminadas têm aproximadamente 0.7 a 0.8 mm, enquanto as lentes de contato têm de 0.2 a 0.5 mm.




O MOCK-UP É REALMENTE NECESSÁRIO?

Sim! O enceramento diagnóstico permite o planejamento e visualização do tratamento. A partir dele, a realização do mock-up em boca possibilita que o paciente visualize o resultado final e o aprove ou não, evitando frustrações ao final. Além disso, é essa etapa que determinará quanto preparo dental será necessário – assunto, aliás, que gera a próxima pergunta.

AFINAL, É NECESSÁRIO ALGUM TIPO DE PREPARO PARA AS LENTES DE CONTATO?

Apesar de a ideia de ausência de necessidade de preparo ser disseminada, ela pode não ser a melhor opção. É importante delimitar o término do preparo para facilitar a confecção da peça, sua prova e cimentação. Pode ser realizado um preparo cervical e proximal em chanfro. Também pode ser interessante preparar a face vestibular com discos de lixa para aumentar a adesão das lentes.

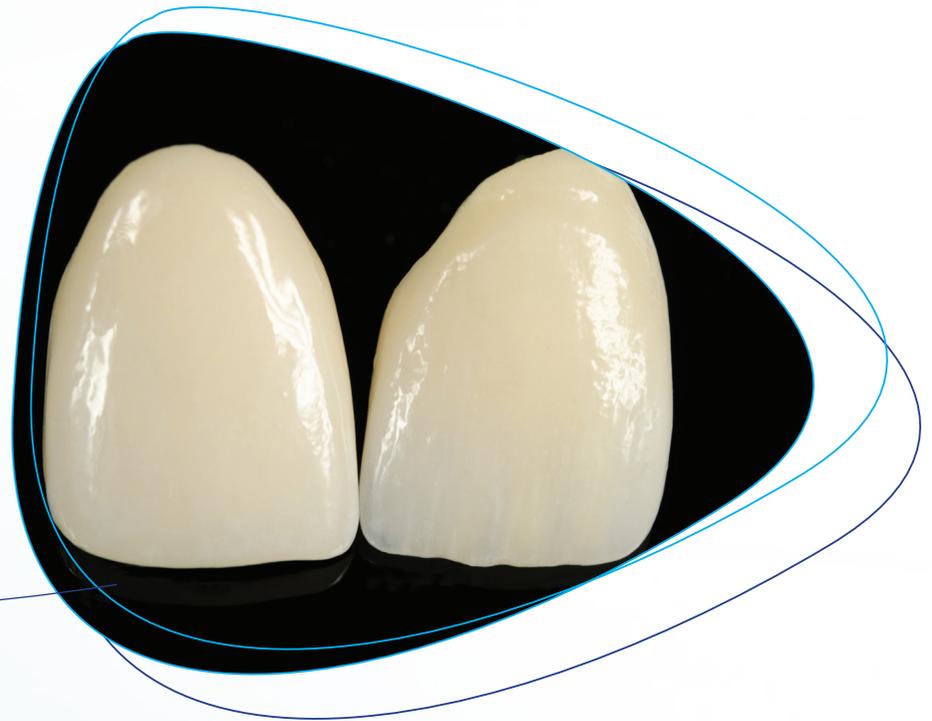

COMO EVITAR ERROS DE MOLDAGEM PARA PEÇAS TÃO DELICADAS?

O dente natural tem características complexas, mimetizadas apenas pelos protesistas e técnicos em prótese mais hábeis com a utilização de materiais desenvolvidos com este fim. A presença destas características traz refinamento ao dente artificial e ao resultado estético: variações de opacidade e translucidez, mudanças de saturação de cervical para incisal, superfície com mamelões, fluorescência, opalescência, dentre outros.

QUE CIMENTO USAR?

A translucidez das lentes de contato exige o uso de cimentos resinosos estéticos, pois a cor do cimento influencia muito no resultado final. Use as pastas para try-in para provar a adaptação das lentes e selecionar a melhor cor de cimento.



Quando o assunto é odontologia, atingir a satisfação de clientes requer dedicação, técnica e um toque de arte.

Nossa maior motivação é ser uma empresa parceira na construção de sorrisos e, principalmente, na construção de carreiras sólidas de cirurgiões-dentistas, marcadas por sucesso e dedicação, melhorando e promovendo a saúde bucal e a boa qualidade de vida das pessoas. Para atingir esses objetivos, nossos trabalhos carregam a nossa filosofia: unir dedicação, habilidade técnica e sensibilidade artística.

Assim, buscamos unir profissionais altamente qualificados com o melhor da tecnologia para sempre oferecer as melhores soluções em próteses, tanto convencionais como sobre implantes. Além disso, participamos constantemente de cursos e eventos para trazer aos nossos clientes todas as novidades do mercado.

**VENHA VISITAR
NOSSO LABORATÓRIO!**



artwork

DENTAL LAB

19 3305.3706 | 19 3307.3702

contato@artworkdentallab.com.br

www.artworkdentallab.com.br

 /artworkdentallab

 /artworkdentallab